

הנחיות שינוע דגימות לבדיקת מיקופלסמה ביונקים

1. קבלת שירות אבחון מיקופלסמה הינה בתאום טלפוני מראש :

- דר' ליסנינסקי אינה טל': 03-9681617, 03-9688940
- דר' גרשמן אירינה טל': 03 – 9681617

לכל בדיקה יש לצרף טופס התחייבות לתשלום.

א. לצורך בדיקת PCR יש לקחת לפחות שני מטושים מאותו מקום, לדוגמה מאף, אוזן או עיניים. נא להשתמש במטושים יבשים מסחריים סטריליים (ללא חומר גילי). יש להכניס דוגמאות לשקית ניילון נקיה ולהעביר למעבדה בקירור (בצידנית עם קרח או קרחומים).

ב. לצורך בידוד יש להעביר קרקע מזון מחולק למבחנות למשק (אפשר לשמור אותו עד שבוע במקרר). לקחת דגימה באמצעות מטושים מסחריים סטריליים, להכניס למבחנות עם קרקע מזון, לשבור מטוש (אורך עד המכסה) ולסגור את המבחנה. להעביר דגימות מייד, תוך מספר שעות, בצידנית לבדיקה במעבדה. במידה ולא מתאפשר להעביר קרקע מזון למשק, יש לשלוח מטושים או איבריים בקירור ליחידה למיקופלסמה.

2. אבקשכם לפעול בהתאם להנחיות בכדי לאפשר ביצוע נכון של הבדיקה וקבלת תוצאות אמינות.